

Q. PMMAブロックを加工するにはどうしたらいいですか。

A. PMMAブロックを装着できるスロットは11のみです。干渉するため他のブロックと並べて加工することは禁忌です。ブランクとして、PMMA block S (15.4 × 19 × 39mm)、PMMA block L (15.5 × 19 × 55mm)、テンプレートとして、スピードモード、ノーマルモードを用意しています。山八歯材工業/レジンブロック/S (15.4 × 19 × 39mm)はPMMA block S、山八歯材工業/レジンブロック/L (15.5 × 19 × 55mm)はPMMA block L、VITA CAD-Temp CT-40 (15.5 × 19 × 39mm)はPMMA block Sのブランクを選択し加工できます。脱落しないように3mmのコネクターを下図のように設定して下さい。最初のT2ミリングバーの加工音は大きいです。

