

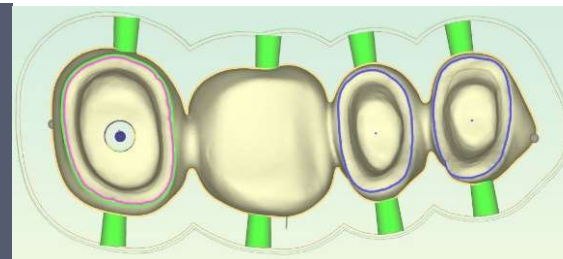


Q. 穴あきのケースで小臼歯の内面が加工されなかったのですがなぜですか。

A. 小臼歯のマージンラインの種類が間違っていることが原因です。

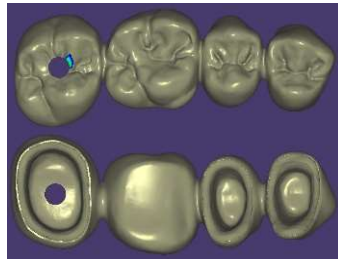


✗ コーピング (青)

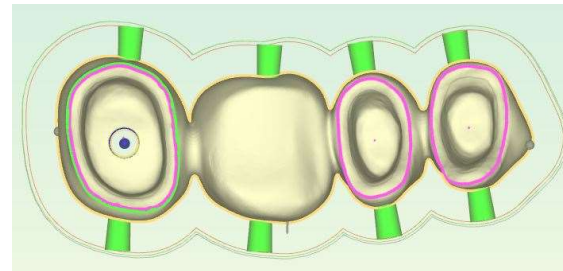


○ アバットメント
ベース (ピンク)

Q. 穴あきのケースで小臼歯の内面が加工されなかったのですがなぜですか。

①パーツ種類が「アバットメント・クラウン・ブリッジ」になっていることを確認しデザインデータを読み込みます。


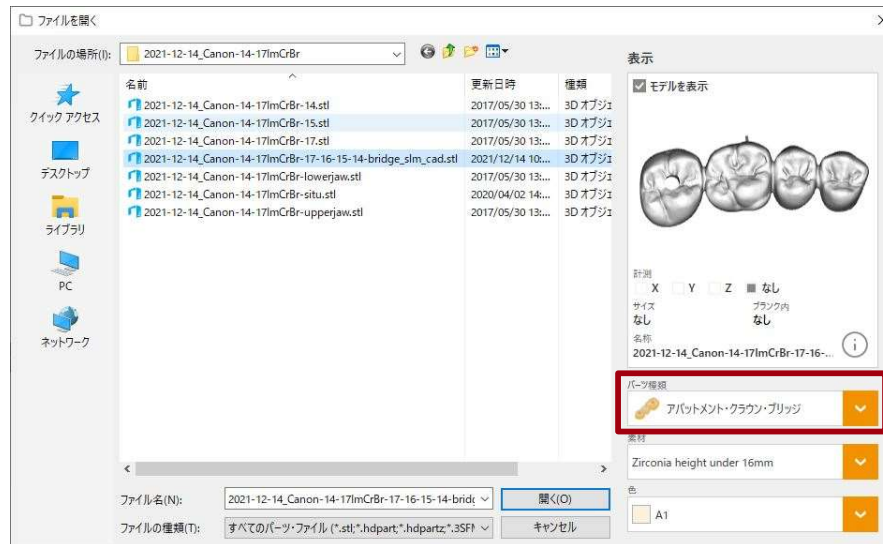


②exocadから読み込んだままだと、小臼歯のマージンラインの種類が「コーピング (青)」になっています。

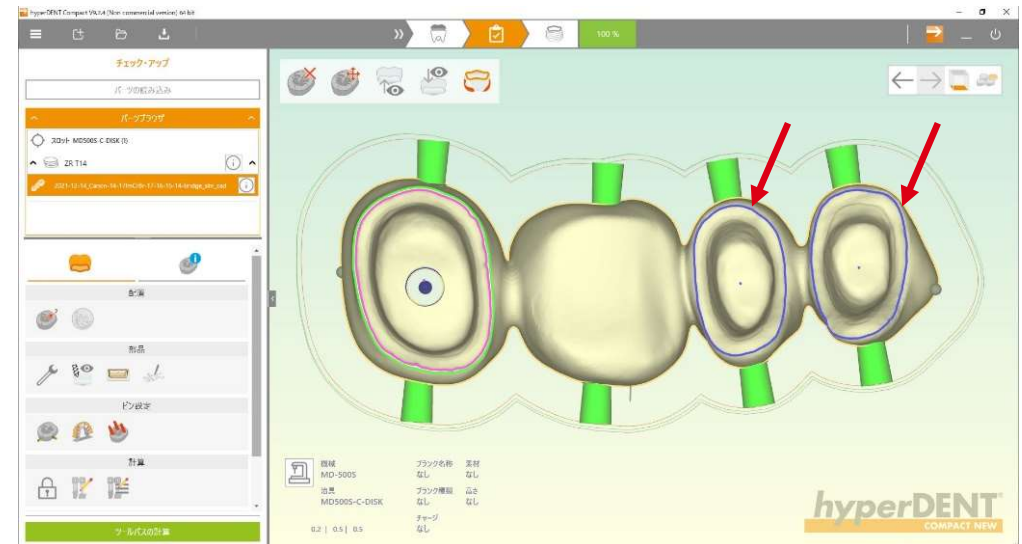


Q. 穴あきのケースで小臼歯の内面が加工されなかったのですがなぜですか。

- ③小臼歯のマーガンをクリックして青から黄色にし左側の基準線の  をクリックします。
- ④黄色のマーガンを右クリックして「マーガンをラインの種類変更」をクリックします。

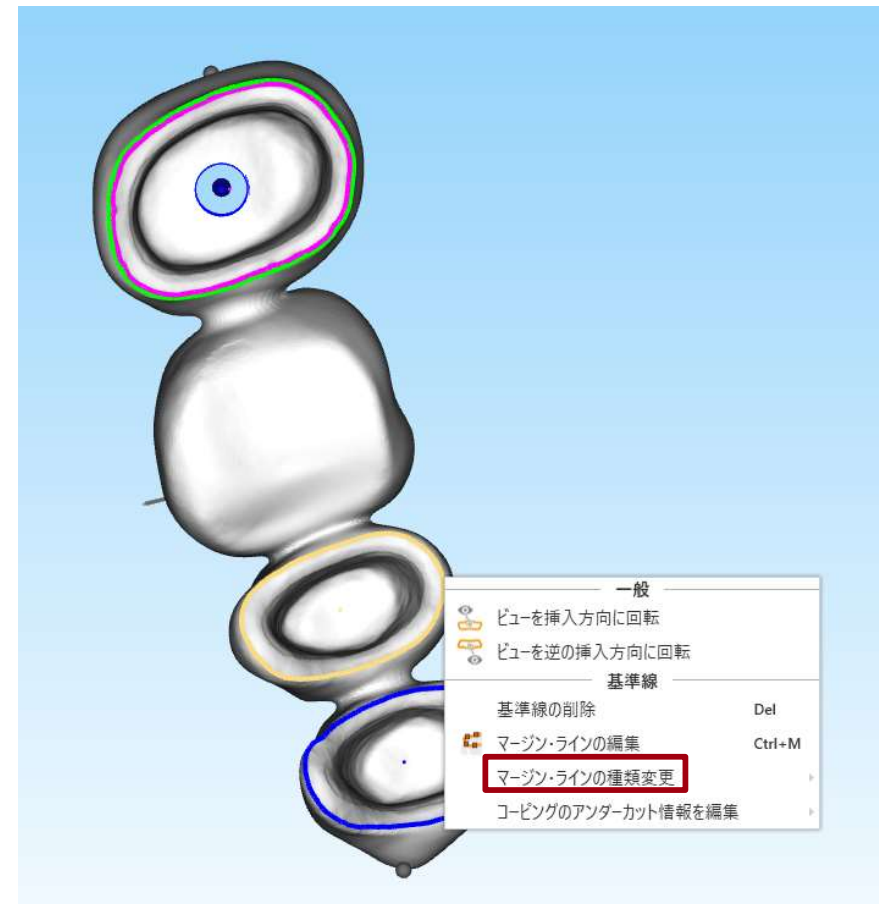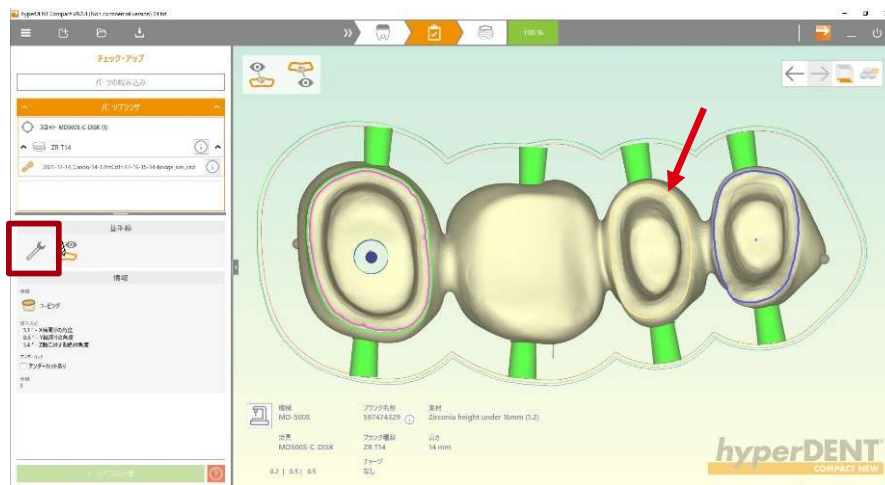

Q. 穴あきのケースで小臼歯の内面が加工されなかったのですがなぜですか。

⑤「アバットメントベース」をクリックします。もう一方の小臼歯も同様に設定します。

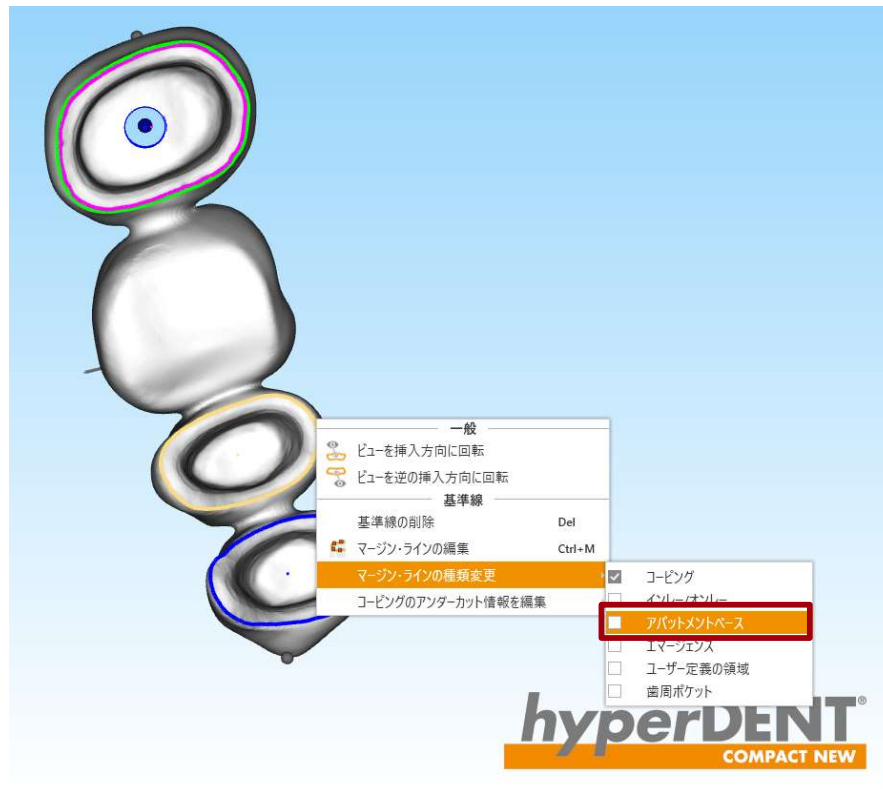

⑥小臼歯のマージンラインの種類がアバットメントベース (ピンク)になりました。シミュレーションで内面が加工されることが確認できます。

